

# Fiche technique





#### **Informations**


Désignation Barre relevable 600 mm, Inox Brossé

048865 Référence

# Les + produit

- + Sécurisant : blocage en position verticale
- + Facilite les transferts et le relevage.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

### Description

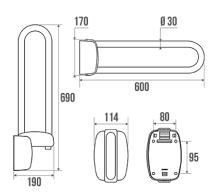

Tube Inox 304 brossé Ø 30 mm. Platines en résine de synthèse.

# Caractéristiques techniques

Finition Brossé Dimensions 600 mm Diamètre Ø 30 mm Matière Inox

Poids brut 2.080 kg

Conditionnement Carton neutre + étiquette

CE - Charge admissible 150 kg 225 kg Tests laboratoire à

PELLET ASC - ZI DE CHAPOTIN - 240 RUE DES FRÈRES VOISIN - CS 270048 - 69967 CHAPONNAY CEDEX - FRANCE - TEL: +33 (0)4 78 96 82 20 - FAX: +33 (0)4 78 96 70 52

Page 1/2







Gencod Code douanier Notice 3563390488652 7324900010 A48860825 IND 04

## Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée pour la barre supérieure : 80 cm du sol dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Sur cloisons peu résistantes, 3 solutions : le poteau de fixation ref. 048400, la béquille de soutien ref. 048810 ou installer une contreplaque derrière la cloison.

#### Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

### Confort d\'usage

Fonction		Caractéristiques	
Maintien	★★☆	Horizontal	***
Relevage	***	Vertical	***
Transfert	***	Anticorrosion	***
Type d'utilisation		Lieux d'utilisation	
Douche	***	Ets médicaux	***
WC	***	ERP/IOP	★★☆
Lavabo	★☆☆	Hôtels	★☆☆
Vestiaire/Cabine	★☆☆	Habitats privatifs	★★☆
		Lieux de travail	★★☆

Fiche produit mise à jour le : 07/09/2023